




Stand
Juli 2017

HEALTHCARE

Produktübersicht für medizinische Einrichtungen

SAUBER. SICHER. EFFIZIENT.

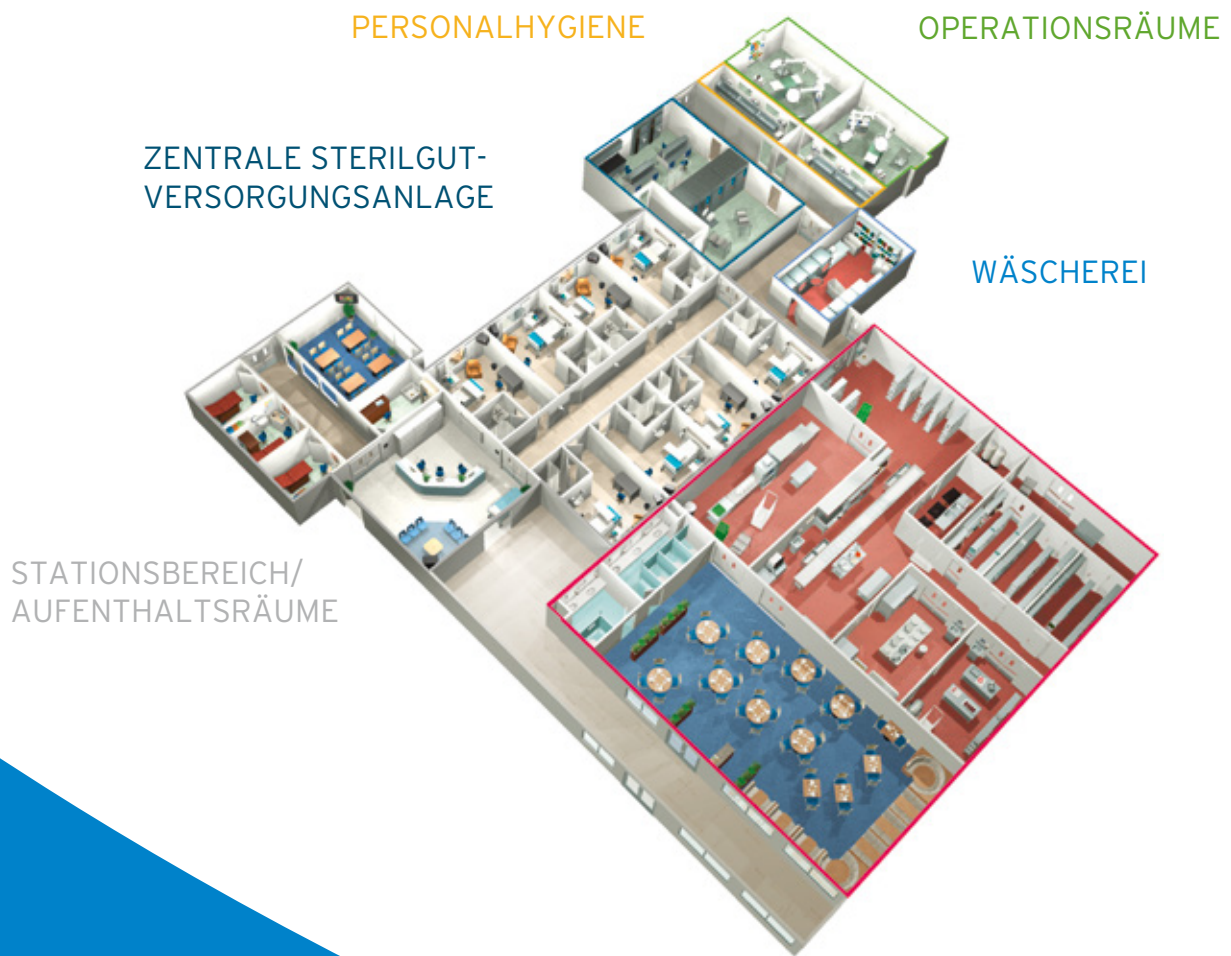

AUF DEN RICHTIGEN PARTNER IST VERLASS!

Dank der langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen weiß Ecolab, wie wichtig Infektionsschutz und Hygiene für Ihre Gesundheitseinrichtung sind. Wir kennen ihre täglichen Herausforderungen und wissen, dass Sie trotz des engen Budgets den strengen hygienischen Anforderungen gerecht werden müssen. Wir unterstützen Sie daher, einen einheitlichen Hygienestandard in der Desinfektion sowie in der Reinigung in Ihrem Haus zu etablieren und zwar auf die effizienteste Art und Weise.

Ihre Herausforderungen

- ▶ Einheitliche und hochwertige medizinische Versorgung.
- ▶ Sicherheit und Infektionsprävention in allen hygienerelevanten Bereichen.
- ▶ Begrenzte Ressourcen für die Umsetzung aller hygienischen Anforderungen.



Ecolab is everywhere it matters.

Über Ecolab Healthcare

Als zuverlässiger Partner an mehr als einer Million Kundenstandorten ist Ecolab (ECL) der weltweit führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Energie zum Schutz des Menschen und lebenswichtiger Ressourcen.

Ecolab bietet in mehr als 170 Ländern umfassende Lösungen und Dienstleistungen vor Ort an, um die Verfügbarkeit von sicheren Nahrungsmitteln zu fördern, eine saubere Umwelt zu erhalten, die Wasser- und Energienutzung zu optimieren und die Produktivität und Wirtschaftlichkeit von Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen, Energie, Gastgewerbe und Industrie zu verbessern.

Profitieren Sie von Ecolab durch ...


- ▲ umfassende Konzepte zur Lösung Ihrer Herausforderungen von Produkt bis Monitoring.
- ▲ qualifizierte Schulung ihrer Mitarbeiter.
- ▲ Reduzierung und Vermeidung von nosokomialen Infektionen in allen Bereichen.
- ▲ Schutz Ihrer Mitarbeiter und Patienten durch sichere Produkte und Reinigungssysteme.
- ▲ moderne, nach neuesten Standards getestete und VAH-gelistete Produkte.
- ▲ optimale Händehygiene, -desinfektion und -pflege.
- ▲ innovative und flexibel einsetzbare Flächendesinfektionsmitteln.
- ▲ einzigartige Konzepte für die Desinfektion und Reinigung von Instrumenten.

... Produkte, Serviceleistungen und Konzepte für alle Hygienebereiche!



Das Service-Gesamtpaket für ein innovatives Hygienemanagement

Instandhaltungsmanagement

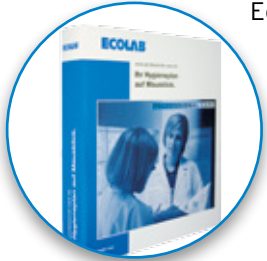

Ecolab bietet als einziger Desinfektionsmittelhersteller mit eigener Dosiergeräte-Produktion ein umfassendes Service-Portfolio. Von der Beratung, dem Projektengineering über die Montage, Inbetriebnahme bis hin zu regelmäßig wiederkehrenden Inspektionen/Wartungen und der hygienischen Überprüfung der Desinfektionsmittellösung. Der Geschäftsbereich Ecolab Healthcare bietet Ihnen mit dem Technical Service ein auf alle hygienerelevante Bereiche zugeschnittenes und optimiertes Service-Portfolio. Die Hygieneleistungen rund um die Dosiertechnik werden von qualifizierten Service-Technikern durchgeführt, die speziell auf den Umgang mit Dosiertechnik, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geschult sind. Ein präventives Instandhaltungskonzept gewährleistet eine hohe Geräteverfügbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Ecolab Internetportal



Unser Ecolab Internetportal erreichen Sie unter www.ecolabhealthcare.de. Dieses Portal unterstützt Sie mit allen wichtigen Informationen rund um die Produkte vom Sicherheitsdatenblatt bis zur Betriebsanweisung. Sie haben die Möglichkeit sich Kataloge und Dosier-tabellen herunter zu laden sowie unsere Newsletter und aktuellen Informationen zu lesen. Videos und andere moderne Medien vermitteln Ihnen beispielsweise die Inhalte unserer Serviceprogramme wie EnCompass™. Sie haben selbstverständlich auch die Möglichkeit über die Seite mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

EnCompass™



EnCompass™ ist ein intelligentes Hygienemanagementsystem, welches mit dem DAZO® Markersystem, ein iPod gestütztes Reportingsystem für das Hygienemanagement ermöglicht. Dies ist eine innovative und zuverlässige Methode zur Kontrolle der Reinigungs- und Desinfektionsleistung des Reinigungspersonals, wodurch die Hygienestandards deutlich verbessert und nosokomiale Infektionen verhindert werden können. Das fluoreszierende Gel zur Markierung bietet eine zuverlässige und einfache Kontrolle der Ergebnisse.

Healthcare NEWS



Wir informieren sie über aktuelle Themen, gesetzliche Änderungen, neue Testnormen und Ecolab-Produkte durch unseren quartalsweise erscheinenden Newsletter. Bei Interesse melden Sie sich gerne über unsere Internetseite an.

Auch unsere Themen-Newsletter wie zu „Clostridium difficile“ bieten Ihnen aktuelle Informationen und Handlungsempfehlungen.

Hautfett- und Hautfeuchtigkeitsmessung



Im Rahmen von „Tag der Hände“-Veranstaltungen bietet Ecolab den besonderen Service einer Hautfett- und Hautfeuchtigkeitsmessung an. Mit einem professionellen Gerät führen unsere speziell geschulten Mitarbeiter eine schnelle und einfache Hautanalyse durch. Ziel dieses Angebotes ist es die Anwender in Gesundheitseinrichtungen von der besonderen Hautverträglichkeit der Ecolab-Produkte zu überzeugen.

Inhaltsverzeichnis



Haut & Hände

Händedesinfektion	7
Waschlotion und -schaum	7
Desinfizierende/Dekontaminierende Waschlotion und -schaum	8
Fußpilzprophylaxe	8
Hautpflege	9
Hautschutz	9
Hautantiseptik	9
Schleimhautantiseptik	9



Flächendesinfektion

Konzentrate	11
Fertiglösungen	12
Tücher, vorgetränkt	12
Incidin® Dry Wipes System	13
Hygienemonitoring	13



Manuelle Instrumentenaufbereitung

Instrumentenreinigung und -desinfektion, aldehydfrei	14
Instrumentenreinigung und -desinfektion, aldehydhaltig	15
Instrumentenreiniger	15



Maschinelle Instrumentenaufbereitung

SolidSafe™ System	17
Instrumentenreiniger	17
OXIVARIO®-Verfahren	18
Neutralisationsmittel	18
Instrumenten-, Betten-, Container Reiniger und Desinfektionsmittel	18
Instrumentendesinfektion	19
Klarspüler	19
Steckbeckenspüler	19
Reinigung und Desinfektion von Hämodialyse-Anlagen	19



Dosiergeräte und Spender

Wandspender und Zubehör	21
Dosiergeräte	24



Desinfektions-Vollwaschmittel

Desinfektions-Vollwaschmittel	25
-------------------------------	----



VORBEUGUNG IST DIE BESTE MEDIZIN

Tag für Tag sind Ihre Hände aktiv. Sie sind das wichtigste Kontaktmedium und Werkzeug des Menschen, aber auch Keimüberträger Nr. 1. Insbesondere im Gesundheitswesen werden Erreger durch die Hände direkt, aber auch indirekt über Flächen und Gegenstände übertragen. Eine sorgfältige Händedesinfektion steht daher an erster Stelle, wenn es um die Keimreduktion und Vermeidung nosokomialer Infektionen geht. Denn schätzungsweise 90% der Krankheitserreger im Krankenhaus werden über die Hände übertragen.

Profitieren Sie von:








- ▶ Infektionsprophylaxe zum Schutz Ihrer Patienten und Mitarbeiter.
- ▶ Vermeidung von infektionsbedingten Folgekosten (Personalausfälle, kostenintensive Isolierungsmaßnahmen etc.).
- ▶ Guter Hautverträglichkeit und anspruchsvoller Pflege von beanspruchter Haut.
- ▶ Servicematerialien wie Aufkleber zur Einreibetechnik.
- ▶ Modernen Schulungsmaterialien wie die UV-Box.



Produktübersicht

ANWENDUNGSBEREICH	PRODUKT	DVV (2008) STANDARDS GETESTET						VAH / DGHM STANDARDS GETESTET			EN STANDARDS GETESTET					
		BEGRENZT VIRUZID	BEGRENZT VIRUZID PLUS	VIRUZID	NOROVIRUS (MNV)	ROTAVIRUS	ADENOVIRUS	BAKTERIZIDE/LEVERUZIDE WIRKSAMKEIT	TALKDRÜSENARME HAUT	TALKDRÜSENREICHE HAUT	EN 1500 HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION	EN 12791 CHIRURGISCHE HÄNDEDESINFEKTION	HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION MIT TUBERKULOZIDER WIRKUNG (TB)	EN 14476 NOROVIRUS	EN 14999 HYGIENISCHE HÄNDE- UND KÖRPERWASCHUNG	TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES IM SUSPENSIONSVERSUCH
HÄNDE-DESINFEKTION	Skinman® complete pure	15 Sek.	60 Sek.	2 Min.	60 Sek.	15 Sek.	60 Sek.	30 Sek.			30 Sek.	90 Sek.	30 Sek.	15 Sek.		
	Skinman® complete	15 Sek.	60 Sek.	2 Min.	60 Sek.	15 Sek.	60 Sek.	30 Sek.			30 Sek.	90 Sek.	30 Sek.	15 Sek.		
	Skinman® soft	30 Sek.				60 Sek.		30 Sek.			30 Sek.	3 Min.	2 x 30 Sek.			
	Spitacid®	30 Sek.	30 Sek.		30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.			30 Sek.	90 Sek.	2 x 30 Sek.	30 Sek.		
	Skinman® clear	15 Sek.	60 Sek.		60 Sek.	30 Sek.	60 Sek.	30 Sek.			30 Sek.	60 Sek.	2 x 30 Sek.	60 Sek.		
WASCHLOTION UND -SCHAUM	Forlan®															
	Manipur®															
	Manisoft® / Manisoft® foam															
	Seraman® sensitive / Seraman® sensitive foam															
FUSSPILZPROPHYLAXE	Skinsan® Scrub N / Skinsan® Scrub N Foam	60 Sek.												30 Sek.		
	Laudamonium®	2% 5 Min.												1% 60 Sek.	1% 60 Sek.	
HAUTPFLEGE/ -SCHUTZ	Silonda®															
	Silonda® sensitive															
	Silonda® lipid															
HAUTANTISEPTIK	Epicare Hand Protect															
	Skinsept® F	15 Sek.				90 Sek.		30 Sek.	60 Sek.	10 Min.	30 Sek.	3 Min.	2 x 30 Sek.			
	Skinsept® G	15 Sek.						30 Sek.	60 Sek.	10 Min.						
SCHLEIM-HAUTANTISEPTIK	Autoderm® Extra							30 Sek.	60 Sek.	10 Min.						
	Skinsept® mucosa							60 Sek.								

Händedesinfektion	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	Skinman® complete pure Viruzides Händedesinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, geeignet für den täglichen Gebrauch. Es ist besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen. Skinman® complete pure hat ein breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren. Nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren). RKI-gelistet (A).	50 x 100 ml 24 x 500 ml 12 x 1 L	3077470 3077490 3077510
	Skinman® complete Viruzides Händedesinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, geeignet für den täglichen Gebrauch. Es ist besonders hautverträglich. Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren) gem. RKI-Empfehlung 01/2004. Farbstofffrei und besonders hautverträglich. RKI-gelistet (A).	50 x 100 ml 24 x 500 ml 12 x 1 L	3060780 3060760 3060740
	Skinman® soft Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren. RKI-gelistet (A).	50 x 100 ml 24 x 500 ml 12 x 1 L 1 x 5 L	3017350 3017360 3017370 3017380
	Spitacid® Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren. RKI-gelistet (A).	50 x 100 ml 24 x 500 ml 12 x 1 L 1 x 5 L	3045630 3003840 3003850 3003860
	Skinman® clear Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit, ohne Zusatz von Duft- und Farbstoffen. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren. RKI-gelistet (A).	50 x 100 ml 24 x 500 ml 12 x 1 L 1 x 5 L	3046030 3033670 3033690 3046050
Waschlotion und -schaum			
	Forlan® Milde Handwaschlotion für die hygienische Händereinigung auf Basis natürlicher Seife. Einsatz bei Überempfindlichkeit gegen künstliche Tenside möglich.	24 x 500 ml 1 x 6 L	3014140 3014160
	Manipur® Eine ausgewogene Kombination aus reinigenden und rückfettenden Anteilen sorgt für eine optimale Reinigung und Pflege. Zum Waschen und Baden von Patienten geeignet. Seifen- und alkaliefrei mit frischem Duft.	24 x 500 ml 12 x 1 L 1 x 6 L	3039030 3009630 3039070

Waschlotion und -schaum	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	Manisoft® Zur schonenden und hautfreundlichen Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion. Eignet sich auch zum Duschen und Baden. Seifen- und alkalifrei mit frischem Duft.	24 x 500 ml 12 x 1 L 1 x 6 L	3087070 3087050 3087110
	Manisoft® foam Ergiebiger Reinigungsschaum mit dezentem Duft. Für alle Hauttypen gut geeignet. Zur anwendungsfreundlichen, wasser- und produktsparenden Hände- und Körperreinigung. Seifen- und alkalifrei.	24 x 400 ml 12 x 800 ml	3039260 3039280
	Seraman® sensitive Hautfreundliche Waschlotion für empfindliche Haut. Moderne und hochwertige Tenside sorgen für eine hautschonende Hände- und Körperreinigung. Bestandteil unserer farb- und duftstofffreien Produktlinie „PURE LINE“.	24 x 500 ml 12 x 1 L	3039380 3038710
	Seraman® sensitive foam Hautfreundlicher Reinigungsschaum. Für die hautschonende Hände- und Körperreinigung und Pflege. Stabiler, cremiger Schaum. Besonders wasser- und produktsparende Anwendung. Bestandteil unserer farb- und duftstofffreien Produktlinie „PURE LINE“.	24 x 400 ml	3038770
Desinfizierende/Dekontaminierende Waschlotion und -schaum			
	Skinsan® Scrub N Antimikrobielle Waschlotion zur Hand- und Ganzkörperwaschung auf Basis von Chlorhexidin. Besonders geeignet zur MRSA/ORSA Dekolonisierung. Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren. Farb- und duftstofffrei sowie besonders hautverträglich. Einfache Anwendung, da das Produkt auf der Haut verbleiben kann. Kein Abwaschen notwendig.	24 x 500 ml	3083220
	Skinsan® Scrub N Foam Antimikrobieller Waschschaum zur Ganzkörperwaschung auf Basis von Chlorhexidin. Besonders geeignet zur MRSA/ORSA Dekolonisierung. Breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren. Farb- und duftstofffrei sowie besonders hautverträglich. Einfache Anwendung besonders bei immobilen Patienten, da das Produkt auf der Haut verbleiben kann. Kein Abwaschen notwendig.	12 x 200 ml	3083380
Fußpilzprophylaxe			
	Laudamonium® Für prophylaktische Maßnahmen gegen Fußpilzerreger. Für die hygienische Hände- und Körperwaschung sowie zur Flächendesinfektion in Nassbereichen.	1 x 6 L 1 x 30 L	3054940 3011700

Hautpflege	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	Silonda® Öl-in-Wasser-Emulsion. Zur Hautpflege beanspruchter und trockener Haut. Reguliert Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut ohne störende Rückstände. Zur Patientenpflege geeignet.	24 x 500 ml	3038870
	Silonda® sensitive Öl-in-Wasser-Emulsion. Die parfümfreie Pflege speziell für Personen mit empfindlicher Haut. Enthält pflegende Öle, die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren. Zur Patientenpflege geeignet. Bestandteil unserer farb- und duftstofffreien Produktlinie „PURE LINE“.	24 x 500 ml	3038970
Hautschutz			
	Silonda® lipid Wasser-in-Öl-Emulsion. Schützt und regeneriert die Haut, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Verbessert gezielt die Hautelastizität. Zur täglichen Pflege und zum Schutz von Haut und Händen.	50 x 100 ml 24 x 500 ml	3008770 3041070
	Epicare Hand Protect Wasser-in-Öl-Emulsion. Schützt gegenüber sauren und alkalischen Lösungen. Parfüm und farbstofffrei und damit auch für lebensmittel verarbeitende Bereiche geeignet. Zur täglichen Pflege und zum Schutz der Haut.	12 x 100 ml 6 x 500 ml	9047690 9047670
Hautantiseptik			
	Skinsept® F Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen und Impfungen – farblos. RKI-gelistet (A). Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB und MRSA) sowie Hefen. Zusätzlich geeignet zur hygienischen Händedesinfektion.	24 x 350 ml 24 x 500 ml 12 x 1 L 1 x 5 L	3003730 3003740 3003750 3003760
	Skinsept® G Zur Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen und Punktionen – gefärbt und jodfrei. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Sehr gute Markierung des Operationsfeldes. Gute Auswaschbarkeit aus Textilien und einfache Entfernung von Oberflächen.	24 x 350 ml 12 x 1 L	3003770 3003780
	Autoderm® Extra Zur Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel. Wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren einschließlich Trichophyton mentagrophytes. Zuverlässige und schnelle Desinfektion von Kopf bis Fuß.	24 x 350 ml 1 x 5 L	3003890 3003900
Schleimhautantiseptik			
	Skinsept® mucosa Schleimhautantiseptikum auf Basis von Chlorhexidin. Umfassendes Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und bestimmte Viren, z.B. wirksam gegen HIV und Herpes Simplex Viren Typ 2. Zur Mund- und Rachen-dekontamination bei MRSA kolonisierten Patienten.	12 x 500 ml	3003870



HÖCHSTE SICHERHEIT SELBST IN RISIKOBEREICHEN

Der täglich durchgeführten Flächendesinfektion wird eine immer höhere Bedeutung bei der Vermeidung von nosokomialen Infektionen in medizinischen Einrichtungen zugeordnet. Gerade zur Wahrnehmung der eigenen Sicherheit und zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung von Keimen wird die routinemäßige Flächendesinfektion gefordert. Die vielfältigen Anwendungsbereiche, das breite Erregerspektrum sowie verschiedene Materialien fordern passgenaue und moderne Produkte mit unterschiedlichen Wirkstoffen.

Sie profitieren von:

- Konsequenter Desinfektionssicherheit für alle Flächen, insbesondere in Risikobereichen.
- Vermeidung von Infektionen durch die Auswahl der richtigen Produkte und Systeme.
- Sicherstellung einer schnellen und zuverlässigen Wieder-Aufbereitung der OP-Räume.
- Innovativen Hygienemonitoring-Programmen wie EnCompass™.



Produktübersicht







PRODUKTGRUPPE	WIRKSTOFFGRUPPE	PRODUKT	WIRKSPEKTRUM														
			LEVUROZID	BAKTERIZID ³	FUNGIZID	TUBERKULOZID	MYKOBAKTERIZID	BEGRENZT VIRUZID ⁶	BEGRENZT VIRUZID PLUS ⁷	VIRUZID	NOROVIRUS (MNV)	ADENOVIRUS	POLYOMAVIRUS (SV40)	ROTA VIRUS	SPORIZID	CLOSTRIDIUM DIFFICILE SPOREN	
KONZENTRATE	ALDEHYDFREI	Incidin® Pro	✓	✓		✓ ⁴	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
		Incidin® Plus	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
		Incidin® Extra N	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓		
	ALDEHYDHALTIG	Incidin® Active	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹⁺²	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓
		Incidin® Rapid	✓	✓					✓	✓	✓ ¹	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓
		Incidin® perfekt	✓	✓					✓	✓	✓ ¹	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓
FERTIGLÖSUNGEN	SCHNELLEDESINFEKTION	Incidin® OxyFoam S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Incidin® OxyFoam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Incidin® Foam	✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	
		Incidin® Liquid	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
TÜCHER	VORGETRÄNKTE	Incidin® OxyWipe S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Incidin® OxyWipe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Sani-Cloth® Active	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹⁺²	✓	✓	✓	✓			
		Incides® N	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		

1 = gemäß RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) 2 = gemäß EN 14476 3 = nach Stand der Wissenschaft sind multiresistente Erreger, wie z. B. MRSA, MRGN, etc. eingeschlossen 4 = Mykobakterizidie schließt Tuberkulozidie ein 5 = Produkt ist viruzid, das schließt Wirksamkeit gegen Noroviren ein
 6 = nach Stand der Wissenschaft sind u. a. HIV, HBV, HCV und Influenza eingeschlossen 7 = zusätzlich zu den behüllten Viren, schließt Adeno-, Noro- und Rotavirus ein

Konzentrate	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Incidin® Pro Aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion von Oberflächen aller Art. Incidin® Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Incidin® Pro ist umfassend geprüft und VAH-gelistet. Die breite Wirksamkeit ist nach den neuesten EN Standards, DGHM- und DVV-Methoden getestet. Bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren. Das farb- und duftstofffreie Incidin® Pro zeichnet sich aus durch kurze Einwirkzeiten, niedrige Anwendungskonzentrationen und sehr gute Reinigungsleistung.</p> 	<p>400 x 20 ml 3 x 2 L 1 x 6 L 1 x 30 L</p>	<p>3076560 3076680 3076760 3076780</p>
	<p>Incidin® Plus Aldehydfreies Flüssigkonzentrat mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin® zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie wirksam gegen Rota-, Adeno- und Polyoma/SV40-Viren. VAH-gelistet. RKI-gelistet (A).</p> 	<p>400 x 20 ml 3 x 2 L 1 x 6 L 1 x 30 L</p>	<p>3012520 3011510 3011520 3011530</p>
	<p>Incidin® Rapid Hocheffizientes Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Viruzide Wirksamkeit auch bei Standardkonzentrationen. Bakterizid, levurozid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren sowie sporizid gegen C. Difficile. VAH-gelistet.</p> 	<p>3 x 2 L 1 x 6 L 1 x 30 L</p>	<p>3040230 3025510 3041970</p>
	<p>Incidin® Extra N Aldehydfreies, noroviruzides Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Anwenderfreundliche Wirkstoffkombination mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin® und QAV. Effiziente, bewährte, noroviruzide Standarddesinfektion. Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren. VAH-gelistet.</p> 	<p>400 x 20 ml 3 x 2 L 1 x 6 L 1 x 30 L</p>	<p>3012530 3011640 3011650 3011660</p>
	<p>Incidin® Active Pulverförmiges Konzentrat zur schnellen, sporenwirksamen, aldehydfreien Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren und sporizid. Das farb- und duftstofffreie Incidin® Active bietet kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen kombiniert mit hoher Materialverträglichkeit durch das einzigartige Wirkstoffsystem PerOxyBalance®. VAH-gelistet. RKI-gelistet (A,B).</p>	<p>4 x 1,5 kg 24 x 160 g</p>	<p>3051850 3051870</p>
	<p>Incidin® perfekt Flüssiges, aldehydhaltiges Konzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Hohe Desinfektionssicherheit auf allen abwaschbaren Flächen, besonders geeignet in Risikobereichen. Bakterizid, levurozid, tuberkolozid und viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren. VAH-gelistet. RKI-gelistet (A,B).</p>	<p>3 x 2 L 1 x 6 L</p>	<p>3011290 3011300</p>

Fertiglösungen	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
 <p>PURE LINE</p>	<p>Incidin® OxyFoam S Gebrauchsfertiges sporizides Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und für Flächen aller Art. Exzellente Materialverträglichkeit. Sicheres¹, wirksames und anwenderfreundliches alkoholfreies Schaumspray mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, viruzid und sporizid. VAH-gelistet. Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet.</p> 	6 x 750 ml 2 x 5 L	3082060 3087450
 <p>PURE LINE</p>	<p>Incidin® OxyFoam Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und Flächen aller Art. Exzellente Materialverträglichkeit. Sicheres¹, wirksames und anwenderfreundliches alkoholfreies Schaumspray zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS und viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren. VAH-gelistet. Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet.</p>	6 x 750 ml	3082160
	<p>Incidin® Foam Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen. Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung. Keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung bei angenehmem Geruch. Gebrauchsfertig. Bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren. VAH-gelistet.</p> 	16 x 750 ml NEU! 2 x 5 L	3046010 3013420
	<p>Incidin® Liquid Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkohlbeständigen Oberflächen. Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung mit hoher Anwenderakzeptanz. Bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren sowie Noroviren. VAH-gelistet.</p> 	12 x 650 ml NEU! 12 x 1 L 2 x 5 L	3089320 3011340 3011350
Tücher, vorgetränkt			
 <p>PURE LINE</p>	<p>Incidin® OxyWipe S Gebrauchsfertige sporizide Hi-Speed H₂O₂™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Exzellente Materialverträglichkeit. Sichere¹, wirksame und anwenderfreundliche alkoholfreie Tücher mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, viruzid und sporizid. VAH-gelistet. Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet.</p> <p>Flowpack: Tuchgröße 20 x 20 cm</p>	6 x 100 Tücher	3082240
 <p>PURE LINE</p>	<p>Incidin® OxyWipe Gebrauchsfertige Hi-Speed H₂O₂™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Exzellente Materialverträglichkeit. Sichere¹, wirksame und anwenderfreundliche alkoholfreie Tücher zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-)Erreger. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS und viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren. VAH-gelistet. Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet.</p> <p>Flowpack: Tuchgröße 20 x 20 cm</p>	6 x 100 Tücher	3082360

Biozid- und Medizinprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für den professionellen Gebrauch. 1Exzellente Materialverträglichkeit - Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff.

Tücher, vorgetränkt	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Sani-Cloth® Active Viruzide vorgetränkte Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen und Instrumenten mit besonders kurzen Einwirkzeiten. Alkohol- und aldehydfrei, mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren gem. RKI-Empfehlung 01/2004) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam (gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren). VAH-gelistet.</p> <p>Dose: Tuchgröße 13 x 22 cm Nachfüllpack: Tuchgröße 13 x 22 cm Dose: Tuchgröße 20 x 22 cm Eimer: Tuchgröße 24,5 x 30 cm</p>	<p>6 x 125 Tücher 9 x 125 Tücher 6 x 200 Tücher 1 x 225 Tücher</p>	<p>3051100 3051120 3051080 3051140</p>
	<p>Incides® N Vorgetränkte Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA und TB) und Hefen. Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008). VAH-gelistet.</p> <p>Nachfüllpack: Tuchgröße 13 x 24,5 cm Dose: Tuchgröße 13 x 24,5 cm</p>	<p>5 x 90 Tücher 6 x 90 Tücher</p>	<p>3013160 3013150</p>
Incidin® Dry Wipes System			
  	<p>Incidin® Wipes Dispenser N Wiederverschließbarer Tuchspender für Ecolab Incidin® Premium Wipes & Incidin® Premium Wipes HygPack; absolut dicht; beständig gegenüber ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln; transparenter Verschlussdeckel standardmäßig mit grüner Kappe.</p> <p>Incidin® Premium Wipes Tuchrolle (99 Tücher/Rolle) aus hochwertigem trockenem fusselfreiem Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin® Produktreihe. Tuchgröße 20 x 38 cm</p> <p>Incidin® Premium Wipes HygPack Bestehend aus einem Folienbeutel zum Einlegen in den Incidin® Wipes Dispenser N, einer Tuchrolle (99 Tücher/Rolle) aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin® Produktreihe sowie einem transparenten Deckel mit farbiger Kappe (wahlweise grün, rot oder blau). Erfüllt die Anforderungen der VAH-Empfehlung für Risikobereiche im Krankenhaus.</p> <p>Tuchgröße 20 x 38 cm</p>	<p>1 Stück</p> <p>6 Rollen á 99 Tücher/Karton</p> <p>6 HygPacks / Karton Deckel blau Deckel grün Deckel rot</p>	<p>10033125</p> <p>10010279</p> <p>10032688 10032689 10032690</p>
Hygienemonitoring			
	<p>EnCompass™ Das neue evidenzbasierte, kostenpflichtige Monitoring-Programm für optimale Reinigung. Durch Beurteilung und Dokumentation von Reinigungsergebnissen wird damit ein neuer Standard gesetzt. Das fluoreszierende DAZO®-Markierungsgel dient hierbei als objektives Messwerkzeug zur fachgerechten Beurteilung von Reinigungsergebnissen. Ein iPod touch dient zur elektronischen Dokumentation der Monitoring-Ergebnisse.</p> <p>Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter!</p>	<p>1 x iPod touch DAZO Markierungsgel* UV-Lampe*</p>	<p>* Lieferung nach Bedarf/ Bettenanzahl</p>

GEEIGNET FÜR RISIKOBEREICHE



RICHTIGE MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Für die manuelle Instrumentenaufbereitung bietet Ihnen Ecolab innovative Produkte mit dem einzigartigen Wirkstoff Glucoprotamin® und dem Wirksystem PerOxyBalance®. Daneben stehen natürlich auch bewährte Produkte zur Reinigung von pH neutral bis alkalisch sowie die klassischen aldehydhaltigen Präparate.

Wir bieten Ihnen ein abgestimmtes Produktsortiment zur Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente.

Unsere Programme und Serviceleistungen unterstützen Sie dabei:

- Medizinisches Instrumentarium effizient, wirkungsvoll und anwenderfreundlich aufzubereiten.
- Den Werterhalt des Instrumentariums durch optimale Materialverträglichkeiten sicher zu stellen.
- Die Aufbereitung zu optimieren und Aufbereitungszeiten durch Anpassung Ihrer Prozesse zu verkürzen.



Produktübersicht

PRODUKTGRUPPE	PRODUKT	GEEIGNET FÜR:							WIRKSPEKTRUM				
		AUFBEREITUNG VON ENDOSKOPEN	MANUELLE AUFBEREITUNG	ULTRASCHALLBAD	INSTRUMENTE	REINIGUNG	DESINFEKTION	MEDIZIN-PRODUKTE-KLASSE		BAKTERIZID, LEVUROZID	BEGRENZT VIRUZID	VIRUZID	SPORIZID
							KLASSE I	KLASSE IIB					
MANUELLE INSTRUMENTEN-AUFBEREITUNG	Sekusept® PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sekusept® aktiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sekusept® Pulver Classic		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Sekudrill®		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Sekusept® Extra N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sekusept® forte	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓
	Sekusept® MultiEnzyme P	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	Sekusept® Pure Clean	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
Sekusept Cleaner		✓	✓	✓	✓		✓						

Instrumentenreinigung und -desinfektion, aldehydfrei

	<p>Sekusept® PLUS Leistungsstarke Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten aus Metall, Kunststoff, Glas. Aldehydfrei. Frei von Aldehyden, auf Basis des Wirkstoffs Glucoprotamin®. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008). RKI-gelistet (A).</p>	<p>4 x 2 L 1 x 6 L</p>	<p>3030910 3011100</p>
	<p>Sekusept® aktiv Die leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen mit umfassendem Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren). Materialverträglichkeit gegen alle gängigen Materialien geprüft und bestätigt. RKI-gelistet (A,B). Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008).</p>	<p>4 x 1,5 kg 1 x 6 kg</p>	<p>3050470 3050570</p>

Instrumentenreinigung und -desinfektion, aldehydfrei			
	<p>Sekucept® Pulver CLASSIC Zur desinfizierenden Reinigung von medizinischen Instrumenten auf Basis von Peressigsäure. Breites Wirkspektrum inklusive Bakterien, Hefen sowie viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008).</p>	<p>4 x 2 kg 1 x 10 kg</p>	<p>3049460 3049530</p>
	<p>Sekucept® Sekudrill® Zur Reinigung und Desinfektion von medizinischen Instrumenten, speziell rotierende Präzisionsinstrumente wie Werkzeugstahl-, Hartmetall- und Diamantschleif-Instrumente. Einsetzbar im Fräsator oder Ultraschallbad. Gebrauchsfertige Lösung und wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren.</p>	<p>4 x 2 L</p>	<p>3031130</p>
Instrumentenreinigung und -desinfektion, aldehydhaltig			
	<p>Sekucept® Extra N Zur desinfizierenden Reinigung von medizinischen Instrumenten, Anästhesiematerial und Endoskopen. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Formaldehydfrei.</p>	<p>4 x 2 L 1 x 6 L</p>	<p>3031010 3017620</p>
	<p>Sekucept® forte Zur Desinfektion von medizinischen Instrumenten, Anästhesiematerial und Endoskopen. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008). RKI-gelistet (A).</p>	<p>4 x 2 L 1 x 6 L</p>	<p>3030970 3017640</p>
Instrumentenreiniger			
	<p>Sekucept® MultiEnzyme P Leistungsstarker pH neutraler Enzymreiniger zur RKI-konformen Vorreinigung medizinischer Instrumente und flexibler Endoskope. Enzymkombination aus Proteasen, Amylase und Lipase.</p>	<p>4 x 2 L 1 x 6 L</p>	<p>3046650 3046670</p>
	<p>Sekucept® Pure Clean Mild alkalischer Reiniger zur RKI-konformen Vorreinigung von medizinischen Instrumenten inklusive flexibler Endoskope. Schaumarmer Formulierung mit niedrigen Einsatzkonzentrationen und umfassender Materialverträglichkeit.</p>	<p>4 x 2 L 1 x 6 L</p>	<p>3080920 3080940</p>
	<p>Sekucept® Cleaner Alkalischer Reiniger zur Vorreinigung medizinischer Instrumente bei starker Verschmutzung und Eiweißbelastung.</p>	<p>4 x 2 L</p>	<p>3031050</p>



GARANTIERT SAUBERE INSTRUMENTE

Mit dem Produkt MetalClean Plus, einem innovativen Feststoffreiniger in Kapselform und dem dazugehörigen SolidSafe™ System haben wir ein einzigartiges System für die maschinelle Instrumentenaufbereitung entwickelt. Dabei wird besonderer Wert auf eine hervorragende Materialverträglichkeit, ein umfassendes Wirkungsspektrum bei der Desinfektion sowie gute Reinigungsergebnisse und niedrige Anwendungskonzentrationen gelegt.

Sie profitieren von:




- ▶ Innovativen Lösungen für die Maschinelle Instrumentenaufbereitung.
- ▶ Aktiver Reinigung und Desinfektion unter Berücksichtigung verschiedener Instrumentenmaterialien und Verfahren.
- ▶ Schutz für Patienten und Personal vor Kontamination.
- ▶ Umweltschutz durch Einsparung von Material und Transport.
- ▶ Betreuung durch technischen Service und qualifizierte Beratung.















Produktübersicht

PRODUKTGRUPPE	PRODUKT	ANWENDBEREICH												
		REINIGUNG	NEUTRALISATION	KLARSPÜLER	DESINFEKTION	MEDIZIN- PRODUKTE- KLASSE		INSTRUMENTE	MIC	OP-SCHUHE	ALU / ELOXAL	BETTENWASCHANLAGEN	CONTAINERWASCHANLAGEN	STECKBECKEN
						KLASSE I	KLASSE IIB							
MASCHINELLE INSTRUMENTEN- AUFBEREITUNG	MetalClean	✓					✓	✓	✓	✓			✓	
	MetalClean Plus	✓				✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® FRE	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	
	Sekumatic® ProClean	✓				✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® Multiclean	✓				✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® FR	✓				✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® PR	✓				✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® OXIVARIO®	✓				✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® FNP		✓			✓		✓	✓	✓			✓	
	Sekumatic® FNZ		✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	Sekumatic® FDR	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sekumatic® FD				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Sekumatic® FK			✓		✓		✓		✓		✓	✓	
	Sekumatic® FKN			✓		✓		✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Sekumatic® FKS			✓		✓		✓		✓			✓	✓
	Sekumatic® FRK	✓		✓		✓		✓		✓				✓
	Peresal				✓		✓							✓

* bedingt geeignet, Verwendung eines Klarspülers in Abhängigkeit vom Spülgut.

SolidSafe™ System	Produktbeschreibung	Liefereinheit	ArtikelNr.
	<p>MetalClean Plus Mild alkalischer Feststoffreiniger für die maschinelle Aufbereitung medizinischer Instrumente. Ergiebig wie etwa 80 L Flüssigkonzentrat. Die Überführung der Feststoffchemie in Flüssigkonzentrat und die Dosierung erfolgt über den SolidSafe™ Dispenser. Besonders gut materialverträglich auch gegenüber empfindlichen Materialien wie Eloxal. Mehr Anwendersicherheit, weniger Lager- und Transportbedarf und stark reduzierte Abfallmengen.</p>	2 x 4 kg	3071100
	<p>MetalClean Mild alkalischer Feststoffreiniger für die maschinelle Aufbereitung medizinischer Instrumente. Das einzigartige Dosiergerät (SolidSafe™ Dispenser, siehe Kapitel „Dosiergeräte & Spender“) überführt Feststoffchemie in flüssiges Konzentrat. Leistungsstarke und schaumarme Rezeptur auf Basis reinigungsaktiver Substanzen und stabilen Alkaliträgern. Gute Materialverträglichkeit auch gegenüber empfindlichen Materialien. Der Inhalt einer Kapsel ergibt etwa 80 Liter Flüssigkonzentrat.</p>	2 x 4 kg	3071040
Instrumentenreiniger			
	<p>Sekumatic® FRE Neutraler Flüssigreiniger auf Enzymbasis zur maschinellen Instrumentenaufbereitung für chirurgische Instrumente, MIC-Instrumente, Kunststoffutensilien sowie Container. Beseitigt effektiv Blut und Eiweiß im Niedrigtemperaturbereich (40 °C – 60 °C). Breites Anwendungsspektrum und sehr gute Materialverträglichkeit.</p>	3 x 5 L 1 x 20 L	3022550 3022540
	<p>Sekumatic® ProClean Mild alkalischer Flüssigreiniger zur maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten. Rückstandsfreie, gründliche Reinigung bei sehr guter Materialverträglichkeit. Geringe Schaumentwicklung und höchste Reinigungsleistung gegenüber typischen Anschmutzungen.</p>	3 x 5 L 1 x 20 L 1 x 200 L	3052820 3052850 3058490
	<p>Sekumatic® MultiClean Mild alkalischer Flüssigreiniger für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Rückstandsfreie, gründliche Reinigung bei sehr guter Materialverträglichkeit sogar gegenüber farbeloxiertem Aluminium. Frei von Tensiden und somit schaumfrei.</p>	3 x 5 L 1 x 20 L 1 x 200 L	3045330 3045350 3045360

Instrumentenreiniger	Produktbeschreibung	Liefereinheit	ArtikelNr.
	<p>Sekumatic® FR Alkalischer Flüssigreiniger zur maschinellen Instrumentenaufbereitung mit hoher Reinigungsleistung gegenüber den typischen Anschmutzungen im medizinischen Bereich, wie z. B. Blut, Eiweiß, Serum. Tensidfrei. Für die Neutralisation nach der Reinigung empfehlen wir Sekumatic® FNZ oder Sekumatic® FNP.</p>	<p>3 x 5 L 1 x 20 L</p>	<p>3023670 3023480</p>
	<p>Sekumatic® PR Alkalisches Reinigungsgranulat für chirurgische Instrumente, Dentalinstrumente, Kunststoffutensilien und Elastomere. Entfernt sogar hartnäckige Verschmutzungen schonend und rückstandsfrei. Für die Neutralisation nach der Reinigung empfehlen wir Sekumatic® FNZ oder Sekumatic® FNP.</p>	<p>1 x 8 kg</p>	<p>3015810</p>
OXIVARIO®-Verfahren			
	<p>Sekumatic® OXIVARIO® Reinigungsaktivator für die alkalisch-oxidative Reinigung medizinischer Instrumente im OXIVARIO® und OXIVARIO PLUS® Verfahren. Kombinierbar mit Sekumatic® FR und Sekumatic® MultiClean.</p>	<p>3 x 2,8 L</p>	<p>3011680</p>
Neutralisationsmittel			
	<p>Sekumatic® FNP Flüssiger Neutralisator auf Phosphorsäurebasis nach einer alkalischen Reinigung. Tensidfrei. Auch zur sauren Vor- und Grundreinigung chirurgischer Instrumente sowie für Kunststoff-Utensilien und Elastomere geeignet. Nicht geeignet für Buntmetalle und eloxiertes Aluminium.</p>	<p>3 x 5 L 1 x 20 L</p>	<p>3015770 3023450</p>
	<p>Sekumatic® FNZ Flüssiger Neutralisator auf Zitronensäurebasis zum Einsatz nach einer alkalischen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, MIC-Instrumenten, starren Endoskopen, Kunststoffutensilien und Elastomeren. Tensidfrei.</p>	<p>3 x 5 L 1 x 20 L</p>	<p>3023510 3023500</p>
Instrumenten-, Betten-, Container Reiniger und Desinfektionsmittel			
	<p>Sekumatic® FDR Die aldehydfreie und effiziente Lösung für die chemo-thermische Aufbereitung in Betten- und Wagendekontaminationsanlagen. Mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin®. Auch für die chemo-thermische Steckbeckendesinfektion sowie zur Desinfektion von Atemschutzmasken in Waschscheudermaschinen und RDGs geeignet. Begutachtet und geprüft vom Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (AK-BWA) und von der Prüfstelle Atemschutz (DEKRA EXAM).</p>	<p>3 x 5 L 1 x 20 L 1 x 200 L</p>	<p>3043820 3043840 3043850</p>

Instrumentendesinfektion	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Sekumatic® FD Flüssiges Desinfektionsmittel für die chemo-thermische Aufbereitung von temperaturempfindlichen Instrumenten und medizinischem Zubehör bei 60°C. Materialschonend. Wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen. Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008). Sekumatic® FD ist optimal abgestimmt auf die Reinigungsmittel der Sekumatic®-Produktpalette.</p>	3 x 5 L	3031940
Klarspüler			
	<p>Sekumatic® FK Flüssiger Klarspüler - Sauer. Die effiziente Lösung für die Klarspülung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie in Betten- und Wagen-dekontaminationsanlagen. Besonders gut geeignet für alle metallischen Instrumente, Glas, Bettgestelle, Transportwagen, Container und OP-Schuhe. Verkürzt die Trocknungszeit und ermöglicht eine fleckenfreie Trocknung des Spülgutes. Erfüllt die Anforderungen des AK-BWA.</p>	4 x 2 L 3 x 5 L 1 x 20 L	3030650 3088500 3022570
	<p>Sekumatic® FKN Flüssiger Klarspüler - Neutral. Verkürzt die Trockenzeit und gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung von Oberflächen aus Kunststoff, Edelstahl oder verchromten Materialien. Einsetzbar in Bettenwaschanlagen. Erfüllt die Anforderungen des AK-BWA.</p>	3 x 5 L 1 x 20 L 1 x 200 L	3029830 3026570 3026580
Steckbeckenspüler			
	<p>Sekumatic® FKS Flüssiger, saurer Klarspüler für die thermische Steckbeckenaufbereitung. Verhindert Kalkablagerungen auf Heizstäben. Auch für höhere Wasserhärtegrade geeignet.</p>	1 x 4,5 L	3088170
	<p>Sekumatic® FRK Flüssiges Reinigungs- und Klarspülmittel für die thermische Steckbeckenaufbereitung. Geeignet für Wasserhärten bis 20°dH</p>	3 x 5 L	3015780
Reinigung und Desinfektion von Hämodialyse-Anlagen			
	<p>Peresal® Zur Desinfektion und Entkalkung von Hämodialyse-Anlagen. Um Patienten und Personal vor Infektionen zu schützen ist die Desinfektion von Hämodialyse-Anlagen wegen des Kontaktes mit Patientenblut unabdingbar.</p>	1 x 6 L	3044010



FÜR DIE SICHERE UND WIRTSCHAFTLICHE APPLIKATION

Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln und anderen Präparaten in hygiene-relevanten Bereichen steht nicht allein das Produkt im Vordergrund, sondern auch die wirtschaftliche, einfache und sichere Applikation. Ecolab bietet für die Herstellung von fertigen Desinfektionsmittellösungen sowie für die Anwendung von Händedesinfektionsmitteln, Waschlotionen und Pflegeprodukten passendes Equipment an.

Sie profitieren von:

- ▲ Sicherer Dosierung von Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln.
- ▲ Innovativer Technik zur Dosierung von Prozesschemikalien in Solid-Kapsel-Form.
- ▲ Anwenderfreundlichen und langlebigen Wandspendern zur Applikation von Händehygiene-Produkten.










Produktübersicht Spender

PRODUKT	HÄNDEDESINFEKTION / SEIFEN		SCHAUMSEIFEN		ARMHEBEL-BEDIENUNG	BERÜHRUNGS-LOS	GESCHLOS-SENES SYSTEM	SCHÜTZT DEN BODEN	EINGANGS-UND PUBLIKUMS-BEREICHE
	500 ml	1.000 ml	400 ml	800 ml	manuell	touchless	abschließbar	Tropfschale	Säule
Dermados® S	✓				✓			✓*	
Dermados® F			✓		✓			✓*	
Dermados® touchless S	✓					✓	✓	✓	
Dermados® mobil S	✓				✓			✓	✓
Dermados® mobil touchless S	✓					✓	✓	✓	✓
Dermados® L		✓			✓			✓*	
Dermados® I		✓			✓		✓	✓*	
Dermados® LF				✓	✓			✓*	
Dermados® touchless L		✓				✓	✓	✓	
Dermados® mobil I		✓			✓		✓	✓	✓
Dermados® mobil touchless L		✓				✓	✓	✓	✓








* Tropfschale ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktübersicht Dosiergeräte

PRODUKT	TECHNISCHE DETAILS												
	PRÜFZEICHEN BUNDESAMT MATERIALPRÜFUNG	ERFÜLLT RKI RICHTLINIE	MIKROPROZESSOR-GESTEUERT	STUFENLOS EINSTELLBAR	DRUCKLOS	EINSTELLBEREICH	EDELSTAHL-GEHÄUSE	WIRTSCHAFTLICH-KEITS-ANALYSEN	HÖCHSTE DOSIERGENAUIGKEIT	FLÄCHEN-DESINFEKTION	INSTRUMENTEN-DESINFEKTION	PROZESS-CHEMIKALIEN IN SOLID-FORM	HYGIENE SPÜL-FUNKTION
Dosiergerät DG1	BAM DDE 1	✓	✓	✓	✓	0,25 - 3%	✓		✓	✓			
Dosiergerät DG2-di		✓	✓	✓	mit Druck-aufbau	Zumisch-bereich: 0,1 - 5%	✓	✓	✓	✓	✓		
Dosiergerät DG2-ci		✓	✓	✓	mit Druck-aufbau	0,1 - 5%	✓	✓	✓	✓	✓		
Dosiergerät DG3	BAM DDE 27	✓	✓	✓	✓	0,25 - 10%	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SolidSafe™ Dispenser			✓		✓				✓			✓	

Wandspender und Zubehör	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Dermados® Wandspender S Wandspender zur wirtschaftlichen Applikation für Händedesinfektion sowie Wasch- und Pflegelotion: universell einsetzbar, funktionssicher und formschön. Wandspender für 500 ml Flaschen.</p> <p>Dermados® Wandspender F Schaumspender zur wirtschaftlichen Applikation für Reinigungsschaum: universell einsetzbar, funktionssicher und formschön. Schaumspender für 400 ml Flaschen.</p>	<p>1 Stück für 500 ml Flaschen</p> <p>1 Stück für 400 ml Flaschen</p>	<p>10000004</p> <p>10097150</p>
	<p>Dermados® Wandspender touchless S Berührungsloser Wandspender für 500 ml Flaschen mit Auffangschale. Lange Batterielaufzeit durch energiesparende Rollerpumpe. Schneller Wechsel von Pumpe und Batterien möglich.</p>	<p>1 Stück für 500 ml Flaschen</p>	<p>10012743</p>
	<p>Dermados® Wandspender L Wandspender zur wirtschaftlichen Applikation für Händedesinfektion sowie Wasch- und Pflegelotion: universell einsetzbar, funktionssicher und formschön. Wandspender für 1 L Flaschen.</p> <p>Dermados® Wandspender LF Schaumspender zur wirtschaftlichen Applikation für Reinigungsschaum: universell einsetzbar, funktionssicher und formschön. Schaumspender für 800 ml Flaschen.</p>	<p>1 Stück für 1 L Flaschen</p> <p>1 Stück für 800 ml Flaschen</p>	<p>10004423</p> <p>10001437</p>
	<p>Dermados® Wandspender touchless L Berührungsloser Wandspender für 1 L Flaschen mit Auffangschale. Lange Batterielaufzeit durch energiesparende Rollerpumpe. Schneller Wechsel von Pumpe und Batterien möglich.</p>	<p>1 Stück für 1 L Flaschen</p>	<p>10012741</p>
	<p>Dermados® Wandspender I Abschließbarer Wandspender zur wirtschaftlichen Applikation für Händedesinfektion sowie Wasch- und Pflegelotion: universell einsetzbar, funktionssicher und formschön. Wandspender für 1 L Flaschen.</p>	<p>1 Stück für 1 L Flaschen (abschließbar)</p>	<p>10000021</p>
	<p>Dermados® S + F Befestigungskit (ohne Bohren) Befestigungsset für Dermados® S+F-Wandspender zur Montage ohne Bohren auf allen festen Untergründen wie Glas, Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Stein. Einfache Montage, bei Bedarf rückstandslose Entfernung. Das Set besteht aus 2 Adaptern, einer Tube mit Hochleistungskleber und einer Anleitung.</p>	<p>1 x 10 Stück</p>	<p>10037291</p>
	<p>Dermados® L + I + LF Befestigungskit (ohne Bohren) Befestigungsset für Dermados® L+I+LF-Wandspender zur Montage ohne Bohren auf allen festen Untergründen wie Glas, Fliesen, Beton, Metall, Kunststoff oder Stein. Einfache Montage, bei Bedarf rückstandslose Entfernung. Das Set besteht aus 3 Adaptern, einer Tube mit Hochleistungskleber und einer Anleitung.</p>	<p>1 x 10 Stück</p>	<p>10037938</p>

Wandspender und Zubehör	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Dermados® mobil Der mobile Desinfektionsmittelspender ist flexibel an vielerlei Standorten einsetzbar und mit bebildeter Anleitung zur hygienischen Händedesinfektion ausgestattet. Er dient der gezielten Infektionsprävention in Eingangsbereichen, ist für 500 ml und 1.000 ml Spenderflaschen geeignet und wird auf eine standfeste Bodenplatte montiert.</p> <p>Dermados® mobil S Dermados® mobil I (abschließbar) Dermados® mobil touchless S Dermados® mobil touchless L</p>	<p>1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück</p>	<p>10019230 10019234 10019636 10019638</p>
	<p>Auffangschale für Dermados® Wandspender S/L/I/F/LF Zubehör zur sicheren Applikation von Händedesinfektion, Wasch- und Pflegelotionen sowie Reinigungsschaum. Einfache und schnelle Montage ohne Bohren. Aus kratz- und schlagfestem Kunststoff. Leicht zu reinigen und desinfizieren.</p>	<p>1 x 10 Stück</p>	<p>10099826</p>
	<p>Wandhalterung für 500 ml Flaschen In Kombination mit der 1 ml Dosierpumpe kann diese Wandhalterung angeklebt oder angeschraubt werden. Zur hygienischen Entnahme von Handhygiene-Produkten.</p>	<p>1 x 20 Stück</p>	<p>102 004 91</p>
	<p>Taschenflaschenclip Für die 100 ml Kittelflaschen Händedesinfektion. Zum praktischen Befestigen an der Arbeitskleidung.</p>	<p>1 x 50 Stück</p>	<p>10099887</p>
	<p>Mehrweg-Dosierpumpe 1 ml Zum Aufschrauben auf 500 ml und 1 L Spenderflaschen. 1 ml pro Hub. Besonders geeignet in Kombination mit der Wandhalterung für die 500 ml Flasche.</p>	<p>5 x 10 Stück für 500 ml Flaschen 5 x 10 Stück für 1 L Flaschen</p>	<p>10000015 10017479</p>
	<p>Einweg-Aufschraubpumpe 1 ml für 500 ml-Flaschen Einweg-Aufschraubpumpe 1 ml für alle Ecolab 500 ml-Flaschen. Besonders geeignet in Kombination mit der Wandhalterung für 500 ml-Flaschen. Zur hygienischen Entnahme aller Händehygieneprodukte. Einfacher Wechsel ohne Aufbereitung.</p>	<p>1 x 24 Stück</p>	<p>10200448</p>
	<p>Handschaumpumpe Zum Aufschrauben auf 400 ml Reinigungsschaum-Flaschen.</p>	<p>1 x 24 Stück</p>	<p>10109978</p>
	<p>Austauschpumpen für Dermados® Wandspender Entsorgen statt aufbereiten. Für hygienisch saubere Spender in Sekunden. Durch einfaches regelmäßiges Austauschen der Pumpeneinheit sparen Sie Zeit, Ressourcen und sorgen für optimale hygienische Bedingungen.</p>	<p>1 x 50 Stück für Dermados® S 1 x 50 Stück für Dermados® L + I</p>	<p>10000169 10009735</p>
	<p>Schaumpumpen für Dermados® Wandspender Entsorgen statt aufbereiten. Für hygienisch saubere Spender – in Sekunden. Durch einfaches Austauschen der Pumpeneinheit sparen Sie Zeit, Ressourcen und sorgen für optimale hygienische Bedingungen.</p>	<p>1 x 10 Stück für Dermados® S + F 1 x 10 Stück für Dermados® L + I + LF</p>	<p>10017775 10001674</p>

Wandspender und Zubehör	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	Kanisteröffner (DIN 51) für Incidin® OxyFoam S und Sekumatic® FKS	1 Stück	10033880
	Wandhalterung Für Incidin® Flowpack Verpackungen. Praktische, passgenaue und stabile Wandhalterung zur einfachen Entnahme der Tücher aus dem Flowpack.	1 x 6 Stück	10033877
	Auslaufhahn - Fertiglösungen (DIN 51)	1 Stück	10033873
	Dosierpumpe 20 ml Für 5 L und 6 L Kanister. 20 ml pro Hub.	2 x 10 Stück	10005073
	Dosierpumpe 35 ml - Konzentrate (DIN 51) Für 5 L und 6 L Kanister. 35 ml pro Hub.	1 Stück	10033881
	Instrumentenwannen 2 L / 8 L / 10 L / 30 L Instrumentenwanne mit 2 L Fassungsvermögen Deckel für Instrumentenwanne 2 L Instrumentenwanne mit 8 L Fassungsvermögen Deckel für Instrumentenwanne 8 L Instrumentenwanne mit 10 L Fassungsvermögen Instrumentenwanne mit 30 L Fassungsvermögen	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	10000049 10001884 10000235 10001891 10000331 10000243
	Magic Blue Testprodukt zu Schulungszwecken zur Erfolgskontrolle bei der Händedesinfektion unter UV-Licht.	1 x 500 ml	SER00064

Dosiergeräte	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Dosiergerät DG1 Das Ecolab DG1 ist ein mikroprozessor-gesteuertes Dosiergerät zur Herstellung von wässrigen Desinfektionsmittel- und Reinigungslösungen. Extrem hohe Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,25 – 3,0 %. Robust, einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Wiederholgenauigkeit. Eine Systemtrennung nach DIN EN 1717 bietet absoluten Schutz vor Rücksog von Desinfektionsmitteln in das Trinkwasserleitungsnetz. Das Ecolab DG1 ist geprüft von der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin gemäß Richtlinien der BAM und des RKI für Desinfektionsmitteldosiergeräte (Prüfzeichen: BAM-DDE 1).</p>	1 Stück	10093566
	<p>Dosiergerät DG2-di Das Ecolab DG2-di ist ein mikroprozessor-gesteuertes Dosiergerät zur Herstellung von wässrigen Desinfektionsmittellösungen und dient insbesondere der Versorgung druckabhängiger Entnahmestellen. Eine integrierte Verbrauchsmengenerfassung sowie ein Störmeldeprotokoll und eine EDV-Schnittstelle ermöglichen Wirtschaftlichkeitsanalysen und eine lückenlose Dokumentation. Extrem hohe Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,1 – 5,0%. Robust, einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Wiederholgenauigkeit. Eine Systemtrennung nach DIN EN 1717 bietet absoluten Schutz vor Rücksog von Desinfektionsmitteln in das Trinkwasserleitungsnetz. Das Ecolab DG2-di erfüllt die Anforderungen gemäß der Richtlinie der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin und des RKI für Desinfektionsmitteldosiergeräte.</p>	1 Stück	10004655
	<p>Dosiergerät DG2-ci Das Ecolab DG2-ci ist ein mikroprozessor-gesteuertes Dosiergerät zur Herstellung von wässrigen Desinfektionsmittellösungen und dient insbesondere der Versorgung druckabhängiger Entnahmestellen. Extrem hohe Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,1 – 5,0%. Höchste Dosiergenauigkeit durch präzise Kennfeld-Steuerung sowie vielfältige Einsatzbereiche durch die kompakte Bauweise. Problemlose Platzierung in Untertischbereichen. Das Ecolab DG2-ci erfüllt die Anforderungen gemäß der Richtlinie der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin und des RKI für Desinfektionsmitteldosiergeräte.</p>	1 Stück	10037514
	<p>Dosiergerät DG3 Das Ecolab DG3 ist ein mikroprozessor-gesteuertes Dosiergerät zur Herstellung von wässrigen Desinfektionsmittel- und Reinigungslösungen. Eine extrem hohe Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,25-10 % ist bei einfachster Bedienbarkeit über ein piktogrammbasiertes Display sichergestellt. Der Digital-Linear-Antrieb sorgt für höchste Dosiergenauigkeit und gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit. Das Ecolab DG3 verfügt über eine integrierte Verbrauchsmengenerfassung (Wasser-, Desinfektionsmittelverbrauch, Entnahmen pro Verbraucher als Einzel- und Gesamtsumme) sowie über ein Störmeldeprotokoll zwecks Fehlerdiagnose. Durch die integrierte Hygienespülfunktion ist auch bei längerem Nichtgebrauch die hygienische Sicherheit gewährleistet.</p>	1 Stück (1-türig) 1 Stück (2-türig)	10026604 10026605
	<p>SolidSafe™ Dispenser Der SolidSafe™ Dispenser ist ein vollautomatisches Dosiergerät zur Dosierung von Solids, welche durch einen Ausspülprozess mit Wasser in flüssige Prozesschemikalien überführt werden. Mittels einer berührungslosen Leitfähigkeitsmesssonde, basierend auf induktiver Messtechnik, findet eine kontinuierliche Überwachung des Ausspülprozesses statt und garantiert höchste Dosiergenauigkeit. Der SolidSafe™ Dispenser ist, wie die Dosiergeräte auch, „Made in Germany“. Das Gerät ist stabil und zuverlässig.</p>	1 Stück	10200284
	<p>Sekumatic FA Sekumatic FA ist eine Förderanlage für Prozesschemikalien im ZSVA-Umfeld. Die Förderanlage dient der Versorgung maschinenintegrierter oder in unmittelbarer Nähe platzierter Day-Tanks / Vorlagebehälter von RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgeräte). Diese Förderanlage realisiert das vollautomatische Befüllen von Day-Tanks mit Prozesschemikalien aus Liefergebinden durch elektromotorisch betriebene Membranpumpen, was den Personalschutz und die Betriebssicherheit gewährleistet. Day-Tanks und Liefergebinde sind niveauerfasst mit der Anlagensteuerung verbunden, definierte Low-Level führen zu Reförderung oder Meldung an in- und externe Signalisierungen. Am Steuerungsdisplay werden Betriebszustände dargestellt, Anlagenparameter verändert und Meldungen quittiert. Sämtliche Abläufe werden überwacht, Überschreitungen gemeldet und bei Störungen die Anlagensegmente gesperrt.</p>	1 Stück	Auf Anfrage



HYGIENISCHE REINHEIT FÜR TEXTILIEN

Egal, ob Sie die Textilreinigung an externe Partner vergeben oder die Wäsche in der eigenen Wäscherei aufbereiten: Saubere Bettwäsche und Handtücher, sterile OP-Textilien und hygienische Reinigungstextilien sind der Schlüssel zu einer sicheren Pflege Ihrer Patienten. Allerdings gibt es viele Faktoren die das markellose Aussehen und das Keimaufkommen beeinflussen.

Profitieren sie von:

- Zuverlässiger Entfernung von hartnäckigen Schmutzpartikeln von OP-Kitteln, Handtüchern oder Reinigungstextilien.
- Schulungen zu effizienter Wäschebehandlung.
- Sparpotential durch den Einsatz unserer Produkte (z. B. Energiekosten).



Produktübersicht

PRODUKTGRUPPE	PRODUKT	WIRKSPEKTRUM											
		LEVUROZID	BAKTERIZID ³	FUNGIZID	TUBERKULOZID	MYKO-BAKTERIZID	BEGRENZT ⁴ VIRUZID	VIRUZID	NOROVIRUS ²	ADENOVIRUS ²	POLYOMA-VIRUS (SV40) ²	ROTAVIRUS ²	CLOSTRIDIUM DIFFICILE SPOREN
DESINFEKTIONS-VOLLWASCHMITTEL	Eltra®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓
	Eltra 40 Extra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓

1 = gemäß DVV/RKI 2 = Test der Viruzidie nach DVV/RKI 2008 schließt, nach Stand der Wissenschaft, die Wirksamkeit gegen diese Viren mit ein.
3 = nach Stand der Wissenschaft sind MRSA und MRGN eingeschlossen 4 = nach Stand der Wissenschaft sind u. a. HIV, HBV, HCV und Influenza eingeschlossen

Desinfektions-Vollwaschmittel	Produktbeschreibung	Liefereinheit	Artikelnr.
	<p>Eltra® Zur bioziden Anwendung für desinfizierendes Waschen von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik wie Krankenhauswäsche, Praxiswäsche, Altenheimwäsche, Textilien aus anderen hygienesensiblen Bereichen sowie Berufsbekleidung aus Küche und Lebensmittelverarbeitung, Feuchtwischbezüge aus Krankenhäusern. Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60/70/80 °C gemäß RKI (AB) und VAH.</p>	<p>1 x 20 kg 1 x 6 kg</p>	<p>1011200 1011210</p>
	<p>Eltra 40 Extra Für die desinfizierende 40 °C Wäsche von weißen und farbigen Textilien aus Mischgewebe und Synthetik sowie Feinwäsche und Wolle (nicht geeignet für Seide; empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäschen aufhellen). Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 40 °C nach VAH. Für alle Waschmaschinen und Wasserhärtebereiche geeignet.</p>	<p>1 x 8,3 kg</p>	<p>9092120</p>

Folgende Desinfektionsmittel sind Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes:**Skinman® complete pure 96 % (v/v) Lösung zur Anwendung auf der Haut**

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). **Sonstige Bestandteile:** Vergällungsmittel Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6-Glycerolcaprylocaprat, Milchsäure (90 %), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht bei Überempfindlichkeit gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Selten kann Skinman® complete pure Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Im Fall, dass bei häufiger Anwendung kleinere Hautirritationen (z.B. trockene Hände) auftreten, sollte die Hautpflege intensiviert werden. **Warnhinweise:** Nur äußerlich anwenden. Leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr). Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei der Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Stand: 12/2014

Skinman® complete Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g der Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). Die sonstigen Bestandteile sind: Vergällungsmittel: Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6- glycerolcaprylocaprat, Milchsäure (90 %), Parfümöl 99-6616 (enthält Orangenöl mit mehr als 90 % Limonen), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Skinman® complete ist ein alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile von Skinman® complete sind. **Nebenwirkungen:** In seltenen Fällen kann Skinman® complete Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Alkohohlhaltige Händedesinfektionsmittel können die Haut austrocknen und Hautirritationen, besonders bei geringer Luftfeuchtigkeit (z. B. im Winter), hervorrufen. **Warnhinweise:** Nur zur äußerlichen Anwendung. Skinman® complete ist leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr). Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind sofort folgende Maßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Produkt von offenem Feuer fernhalten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei Anwendung von Skinman® complete bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Stand: 06/2016

Skinsept® mucosa Lösung.

Zusammensetzung: 100 g Skinsept® mucosa enthalten: Wirkstoffe: 10,4 g Ethanol (96%), 1,67 g Wasserstoffperoxid-Lösung (30 %), 1,50 g Chlorhexidinbis(Dgluconat)-Lösung (20 %). Sonstige Bestandteile: Milchsäure, Macroglycerohydroxystearat, Povidon, Geruchsstoffe, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Schleimhautantiseptikum für die Behandlung von oberflächlichen Schleimhäuten und angrenzender Haut im Vaginalbereich, Glans penis, Orificium urethrae externum, wenn eine Keimzahlverminderung erforderlich ist, und im Mund- und Rachenraum. **Gegenanzeigen:** Skinsept® mucosa darf nicht angewendet werden wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe Ethanol (96 %), Wasserstoffperoxid-Lösung (30%), Chlorhexidinbis(D-gluconat)-Lösung (20 %) oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kinder wegen bisher fehlenden Erfahrungen. Nicht auf großflächigen Wunden, am Auge und im Ohr anwenden. Zur oralen Anwendung bei Alkoholkranken aufgrund des Ethanol-Gehaltes nicht geeignet. Skinsept® mucosa sollte nicht in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und auf Nasen- und Bronchialschleimhäuten angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Selten (1 bis 10 Behandelte von 10.000) treten Urtikaria und allergische Reaktionen bis zum anaphylaktischen Schock auf. Häufig (1 bis 10 Behandelte von 100) können irritative Hautreaktionen und Kontaktdermatitis auftreten. Gelegentlich (1 bis 10 Behandelte von 1.000) ist leichtes Brennen möglich. Verätzungen der Haut wurden bei Neugeborenen und Säuglingen für chlorhexidinhaltige Produkte beobachtet (Häufigkeit unbekannt). Vorübergehende Geschmacksbeeinträchtigungen können in seltenen Fällen auftreten. Reversible Verfärbung der Zähne, Zunge und Mundschleimhaut wurde bisher nicht beobachtet, sind jedoch für chlorhexidinhaltige Präparate bei längerfristiger Anwendung beschrieben. **Warnhinweise:** Das Arzneimittel enthält 12,4 Vol.-% Ethanol. Skinsept® mucosa ist nur äußerlich anzuwenden. Stand: 11/2012

Skinman® clear Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Wirkstoff: 1-Propanol. **Zusammensetzung:** 100 g Skinman® clear enthalten: Wirkstoff: 70,0 g 1-Propanol Sonstige Bestandteile: Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Glycerol 85 %, Milchsäure 90 %, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs. Gebrauchsinformation beachten. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich treten kontaktirritative und sehr selten kontaktallergische Reaktionen der Haut wie Rötung oder Brennen auf. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): + 29 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman® clear während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In Originalgebinden nicht über +25 °C lagern. Stand: 03/2017

Autoderm® Extra Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Autoderm® Extra Lösung enthalten: Wirkstoffe: 46 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27 g 2-Propanol, 1 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur präoperativen Hautantiseptik. Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen, Impfungen, Blutentnahmen und bei Verbandwechsel. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegen die Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Bisher keine bekannt. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 21 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregel beachten; vor Anwendung elektrischer Geräte, Produkt antrocknen lassen; Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen; vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt mind. 1 Minute antrocknen lassen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Die Erfahrung bei Kindern ist begrenzt. Autoderm® Extra darf bei Säuglingen nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Stand: 06/2017

Skinsept® F Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Skinsept® F enthalten: Wirkstoffe: 70,0 g 2-Propanol, 0,5 g Chlorhexidinbis(D-gluconat), 1,5 g Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %. Sonstige Bestandteile: Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Gebrauchsfertige Lösung für die - Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen - hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Zur Wundantiseptik nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Selten (weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten) treten Urtikaria und allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auf. Häufig (weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten) können irritative Hautreaktionen und Kontaktdermatitis auftreten. Eine kurzzeitige Rötung der Haut ist in den meisten Fällen bedeutungslos und verschwindet von selbst. Verätzungen der Haut wurden bei Neugeborenen und Säuglingen für chlorhexidinhaltige Produkte beobachtet (Häufigkeit unbekannt). **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (n. DIN 51755): 20 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt bei der Hautantiseptik mindestens 1 Minute antrocknen lassen. Verätzungen der Haut wurden nach topischer Anwendung mit Chlorhexidinguconat bei Neugeborenen und Säuglingen beobachtet. Frühgeborene scheinen aufgrund der Unreife der Hautbarriere besonders gefährdet zu sein. Daher sollte Skinsept F nur bei Neugeborenen und Säuglingen eingesetzt werden wenn es keine therapeutische Alternative gibt und der zu erwartende Nutzen die Risiken überwiegt. Es wird empfohlen die überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Stand: 02/2015

Skinsept® G Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Skinsept® G Lösung enthalten: Wirkstoffe: 46 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, Povidon, Ponceau 4R E 124, Gelborange S E 110, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Gebrauchsfertige Lösung für die Hautantiseptik von Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Skinsept® G darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ponceau 4R E 124, Gelborange S E 110 oder einem der sonstigen Inhaltsstoffe. Vor der Anwendung eines Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte immer ein Arzt oder Apotheker befragt werden. Eine Anwendung bei Säuglingen darf nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. **Nebenwirkungen:** Ponceau 4R E 124 und Gelborange S E 110 können Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Kontaktreaktionen der Haut können auftreten. **Warnhinweise:** Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 21 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte, insbes. Elektrokauter, Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Dieses Arzneimittel enthält Azofarbstoffe E 110/ E 124, die bei Personen, die gegen diese Stoffe besonders empfindlich sind, allergische Reaktionen hervorrufen können. Die Allergie tritt häufiger bei Personen auf, die gegen Acetylsalicylsäure allergisch sind. Stand: 03/2013

Spitacid® Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Spitacid® enthalten: Wirkstoffe: 46,0 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 1,0 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht zur Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Die Anwendung von Arzneimitteln in der Schwangerschaft sollte grundsätzlich immer unter besonderer Vorsicht erfolgen. Bei sachgemäßer Anwendung kann Spitacid® in der Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Kontaktreaktionen der Haut sind möglich. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (nach DIN 51755): 21°C; vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Stand: 03/2017

Skinman® soft, Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Zusammensetzung: 100 g Skinman® soft enthalten: Wirkstoffe: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Geruchsstoffe, Patentblau V (E 131), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman® soft während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Stand: 06/2013

1. Geltungsbereich

Die Lieferungen des Verkäufers erfolgen nur zu den nachstehenden Verkaufsbedingungen. Von diesen abweichende Vereinbarungen oder Geschäftsbedingungen des Bestellers bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Verkäufers, soweit sie diesen Bestimmungen entgegenstehen. Die Verkaufsbedingungen des Verkäufers werden spätestens mit Annahme der Lieferung Vertragsbestandteil.

2. Vertrag

2.1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Liefervereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vom Verkäufer bestätigt werden.

2.2. Als vereinbart gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis zuzüglich der in den Rechnungen offen auszuweisenden Steuern.

Übergebene Preislisten sind Gegenstand des Vertrages, soweit sie den Allgemeinen Verkaufsbedingungen und/oder gesonderten Vereinbarungen nicht entgegenstehen.

3. Pflichten des Bestellers

Nimmt der Besteller die Lieferung nicht ab, ist der Verkäufer berechtigt, nach Setzung einer Nachfrist von vier Wochen vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im letzten Fall ist der Verkäufer berechtigt, entweder ohne Nachweis eines Schadens 10 % des Kaufpreis oder Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu verlangen.

Statt dieser Rechte kann der Verkäufer innerhalb einer mit dem Besteller vereinbarten, angemessenen, verlängerten Lieferfrist eine gleichartige Lieferung zu den vereinbarten Bedingungen durchführen. Die Kosten einer zweiten oder weiteren Lieferung trägt der Besteller.

4. Zahlung

4.1. Die Rechnungsbeträge sind durch Banklastschrift oder gemäß den Konditionen des Verkäufers auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zu zahlen.

Die Rechnungen sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar.

Auf der Auftragsbestätigung und/oder Rechnung genannte Zahlungsfristen, insbesondere auch für die Fristberechnung bei Skontoabzügen, beginnen mit dem Rechnungsdatum. Vereinbarte Skontoabzüge sind nur zulässig, insofern keine bereits fälligen Rechnungen zu begleichen sind.

Im Falle der Überschreitung von Zahlungsfristen befindet sich der Besteller ohne Mahnung in Verzug; der Verkäufer ist berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber in Höhe von 6 % zu verlangen. Verzugszinsen sind sofort fällig. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Die Zurückhaltung der Kaufsumme und Abzüge irgendwelcher Art sind nicht zulässig.

4.2. Ohne Rücksicht auf die vereinbarte Zahlungsweise kann jederzeit Zahlung oder Sicherheitsleistung auch schon vor erfolgter Lieferung verlangt werden, falls nach Abschluss des Vertrages begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen, vereinbarte Zahlungs- und Lieferungsbedingungen in wesentlichen Punkten nicht eingehalten werden oder wesentliche Veränderungen in den Geschäftsverhältnissen des Bestellers auftreten. Der Verkäufer ist in diesem Fall auch berechtigt, jederzeit von allen mit dem Besteller laufenden Verträgen ganz oder teilweise zurückzutreten oder vom Besteller Ersatz seiner Aufwendungen oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dem Verkäufer steht es frei, welches Recht er bezüglich eines jeden einzelnen Vertrages ausüben will.

4.3. Reisende sind zum Inkasso nur bei Vorlage einer besonderen Anweisung der Zentrale des Verkäufers berechtigt.

5. Lieferung

5.1. Die Wahl des Beförderungsweges erfolgt mangels besonderer Weisung des Bestellers durch den Verkäufer nach pflichtgemäßem Ermessen.

Die Lieferung erfolgt frachtfrei an das Domizil des Bestellers vorausgesetzt, die aktuell gültigen Mindestabnahmewerte bzw. -volumen sind je Anlieferadresse bei Auftragserteilung berücksichtigt. Andernfalls wird eine Frachtkostenbeteiligung in der jeweils gültigen Höhe erhoben. Zusätzliche Frachtkosten bei Eillieferungen etc. gehen zu Lasten des Bestellers.

5.2. Für die Bestimmung des Gewichts der Lieferung ist das bei der Absendung im Lieferwerk oder Lager festgestellte Gewicht maßgebend.

5.3. Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit dem Datum der Vereinbarung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben. Wird ein vereinbarter Liefertermin um mehr als vier Wochen überschritten, so hat der Besteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

Ein Recht zum Rücktritt besteht nicht, wenn der Verkäufer den Liefertermin ohne sein Verschulden nicht einhalten kann. In diesem Fall kann der Besteller drei Monate nach Überschreitung des ursprünglichen Liefertermins vom Vertrag zurücktreten.

Vom Verkäufer nicht zu vertretende Ereignisse, durch welche die Lieferung oder ihr Transport unmöglich oder unzumutbar erschwert wird, geben dem Verkäufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung bis zur Beseitigung des Hindernisses hinauszuschieben. Diese Umstände sind vom Verkäufer dem Besteller unverzüglich mitzuteilen. Schon erfolgte Teillieferungen gelten als selbständiges Geschäft; wegen der noch ausstehenden Mengen darf die Regulierung der Teillieferung nicht verweigert werden. Im Falle des Hinausschiebens der Lieferung aus den vorgenannten Gründen entsteht kein Recht des Bestellers zur Nachfristsetzung und zum Rücktritt.

Schadensersatzansprüche wegen Rücktritts sind ausgeschlossen. Bei mindestens grob fahrlässig herbeigeführter verspäteter Lieferung/Teillieferung oder bei Nichtlieferung/teilweiser Nichtlieferung ist der Schadensersatzanspruch auf den voraussehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

6. Gefahrübergang

Die Gefahr geht - sofern nicht anders vereinbart ist - mit der Absendung der Lieferung von dem Lieferwerk oder Lager auf den Besteller über. Der Besteller trägt die Gefahr für alle zurückgenommenen Lieferungen während des Rücktransportes.

7. Gewährleistung

7.1. Erkennbare Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Lieferung am Bestimmungsort dem Verkäufer anzuzeigen. Proben der beanstandeten Lieferung sind einzusenden. Sind am Verladeort durch neutrale Probennehmer Muster gezogen worden, so sind diese für die Begutachtung der Lieferung allein maßgebend. Für verarbeitete Lieferungen oder nach Weiterverkauf können Gewährleistungsansprüche nur bei Vorliegen neutral gezogener Proben geltend gemacht werden. Neutral gezogene Proben gleich stehen die bei dem Besteller vorhandenen Originalreststücke der Verarbeitung oder dem Weiterverkauf zugrundeliegenden Lieferung des Verkäufers. Das gleiche gilt für Reststücke der Produktionscharge beim Verkäufer, aus der die beanstandete Lieferung stammt.

7.2. Liegt ein Mangel vor, so kann der Besteller - sofern nicht etwas anderes vereinbart ist - nur Nachlieferung der beanstandeten Lieferung verlangen. Führt die Nachlieferung nicht zu einer Behebung der Mängel, ist der Besteller zur Minderung oder Wandlung berechtigt. Bei allen Lieferungen im Rahmen der Mängelbeseitigung gilt die vereinbarte Mängelhaftung. Bei Fehlern zugesicherter Eigenschaften steht dem Käuferwahlweise das Recht zur Wandlung, Minderung oder zum Schadensersatz zu. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden obliegt dem Verkäufer jedoch nur, soweit diese Gegenstand der Zusicherungserklärung waren. Die Ansprüche des Bestellers wegen eines Mangels der gelieferten Sache verjähren in 12 Monaten nach Ablieferung der Sache. Im Übrigen sind weitergehende Ansprüche für mittelbare oder unmittelbare Schäden aus positiver

Forderungenverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit für Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Lieferers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen zwingend gehaftet wird. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen ist, gilt dies auch zugunsten seiner Mitarbeiter bei deren direkter Inanspruchnahme durch den Besteller. Ansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder aus Garantiezusagen können nur geltend gemacht werden, wenn die zugesicherten Eigenschaften oder Garantiezusagen schriftlich vom Verkäufer bestätigt worden sind.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird. Wird Vorbehaltsware vom Besteller zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.

8.2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zur Verwendung der Vorbehaltsware im Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrages nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, daß die Forderungen gemäß Ziff. 8.3. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder im Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrages zu verwenden, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

8.3. a) Der Besteller tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bzw. aus der anderweitigen Verwendung der Vorbehaltsware im Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrages - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - an den Verkäufer ab.

b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Forderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.

c) Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter.

8.4. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Der Besteller ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Auflistung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhandigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

8.5. Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit dessen sämtliche Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Bestellers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

8.6. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen. Nimmt der Verkäufer aufgrund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der Verkäufer dies ausdrücklich erklärt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B.: Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.

9. Leihverpackungen / Paletten

9.1. Soweit eine Vereinbarung über die Warenbereitstellung auf Paletten abgeschlossen wird, sind wir bereit, Warenpartien auf Euro-Pool-Paletten der Abmessungen 800 x 1200 mm zu liefern. Anlieferung erfolgt nur im Tausch Zug - um - Zug, d.h., für die mit der Ware angelieferten Paletten muß im Austausch die gleiche Anzahl unbeschädigter Leerpaletten (jeweils nur Euro-Pool-Paletten) zur Verfügung gestellt werden. Paletten, die wir beschädigt aber reparaturfähig zurückerhalten, werden wir mit den Reparaturkosten in Rechnung stellen, nicht reparaturfähige Paletten mit dem Wiederbeschaffungswert. Der Nachweis, daß im Einzelfall Paletten bereits beschädigt übernommen worden sind, obliegt dem Kunden. Bei abhandengekommenen Paletten ist der Empfänger verpflichtet, für Ersatz zu sorgen oder einen Betrag in Höhe der Wiederbeschaffungskosten an uns zu zahlen.

9.2. Für alle Verpackungen, die in den Rechnungen nicht ausdrücklich als Leihverpackungen und/oder Mehrweggebilde bezeichnet sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Mehrweggebilde stellen wir leihweise bis zur Entleerung zur Verfügung. Diese Gebilde werden von uns an die Produktionsstätten zur weiteren Nutzung zurückgeführt.

10. Schlussbestimmungen

10.1. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Lieferbedingungen oder des Liefergeschäfts unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der richtigen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.

10.2. Erfüllungsort - soweit gesetzlich zulässig - für alle sich aus dem Liefergeschäft ergebenden Verbindlichkeiten und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Liefergeschäft und/oder einem Urkundenprozeß ist ausschließlich der Sitz des Verkäufers, soweit nichts anderes vereinbart wird.

10.3. Die Beziehungen zwischen Verkäufer und Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der Bestimmungen des Einheitlichen Gesetzes über den Abschluß von internationalen Kauf beweglicher Sachen und des Einheitlichen Gesetzes über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen und des Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen bzw. des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf wird ausgeschlossen.

**LEAVE
ON**
KEIN ABSPÜLEN
ERFORDERLICH

ECOLAB®



Skinsan® Scrub N

Die komfortable Art der MRSA Dekolonisation
für Sie und Ihre Patienten

- ▲ **STARK** - breites Wirkspektrum mit Remanenzwirkung über 24 Stunden
- ▲ **VERTRÄGLICH** - Hervorragende Hautverträglichkeits- und Hautpflegeeigenschaften
- ▲ **ANWENDERFREUNDLICH** - Einfache Anwendung speziell bei immobilen Patienten - Produkt muss nicht abgespült werden

Biozid- und Medizinprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.



EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41(0)44-877-2001
www.ecolab.eu


ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de



www.ecolabhealthcare.de

ECOLAB®